

APO708 N95マスク (折りたたみ式)

Particulate Respirator



米国 NIOSH 微粒子マスク クラス N95 認定 (42CFR84) 厚生労働省 SARS 対策指定品



- 空気感染予防 (新型インフルエンザ・SARS・結核菌など) 対策に対応するマスクです。
- 収納時・備蓄にスペースをとらない折りたたみ式。保管に便利な1枚毎包装。
- 空間調整用のノーズピースによりフィット性を高めます。



この製品は、疾患または感染のリスクを皆無にするものではありません。マスクが血液、体液で汚染された場合、直ちに交換して下さい。不適切な着用、誤った取り扱いをした場合健康に害を及ぼす恐れがございます。


■ 基本性能

	メーカー規格値	NIOSH 規格値
粒子捕集効率 (NaCl)	99.0%以上	95%以上
吸気抵抗値	105PA 以下	343PA 以下
排気抵抗値	110PA 以下	245PA 以下
梱包単位	30枚 / 箱	-


装着方法




① マスクを手に取り左右に広げます。

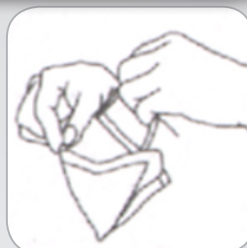


② マスクを固定し中から紐を引き出します。

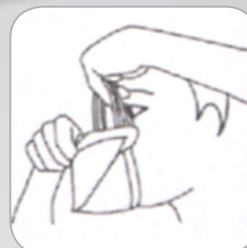


③ マスクの下部をあごに固定し、紐を上にあげます。

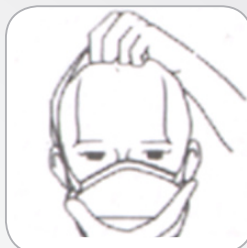

④ 頭に紐を引き、首部までそれをまわします。

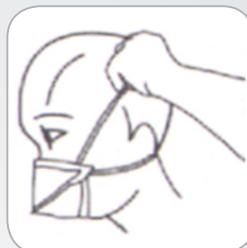

⑤ 紐のうち1本を引き頭頂部にて固定します。

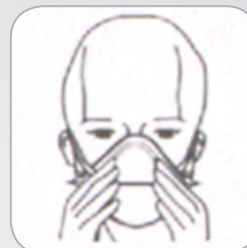

⑥ 鼻部のノーズピースを調節し装着完了です。

商品名	商品番号	規格	入数	定価
N95 マスク (折りたたみ式)	AP0708	折りたたみ式	30枚 / 箱 × 20	オープン価格

掲載商品に関するご質問は、販売代理店・営業部までお問い合わせください。他にも対策商品を取り揃えております。弊社ホームページも是非ご覧ください。

株式会社 ノイロバーティ

本社営業部 〒503-0885 岐阜県大垣市新田町4-45番地
TEL 0584 (87) 1020
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5
第二KSビル4F
TEL 03 (3813) 2463