



Cアームカバー（グリップタイプ）

C-ARM Grip COVER

- ・ X線画像診断装置（Cアーム等）を汚染の恐れのある液体等から清潔に保つポリプロピレン製カバー
- ・ Cアーム本体との接合がグリップにて着脱可能ですので、容易に行うことが可能です。
- ・ 特殊タタミになりますので装着時の清潔野を確保した設置・取り外しが可能です。

Cアームカバー（クリップタイプ）

●イメージカバー（管球用）
※別売り

●Cアームカバー

※別売り

■Cアーム部詳細

■グリップ有効幅

内径 140mm
クリップ奥行き 100mm

■装着方法

- ①メッキンバッグより、清潔に本体を取り出します。
- ②器械上部より順番にグリップにて固定をしていきます。
- ③本体下部まで展開をし終えたらたるみ等の調整を行います。
- ④別売りの管球用イメージカバーをそれぞれセットします。

（状況により添付の両面テープにて固定します）

上記製品は、カスタマイズが可能な製品になります。
構成品の変更・別注品の依頼は弊社営業担当もしくは販売代理店までご相談ください。

商品名	商品番号	サイズ・規格	入数	定価	滅菌	JAN
Cアームカバー (グリップタイプ)	PP-CARM-G	410mm × 2400 mm	20 枚 / 箱 × 2	2000 円 / 枚	○	4582115112459

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEIL-BAR-T
ハイバルト

【本社営業部】
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4丁目45番地
TEL: 0584 (87) 1020
【東京支店】
〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 第二KSビル4F
TEL: 03 (3813) 2463