


Cアーマーカバーセット (フィルム製)

C-ARMER COVER SET

- ・ X線画像診断装置 (Cアーム等) を汚染の恐れのある液体等から清潔に保つポリプロピレン製カバー
- ・ Cアーム部、管球用、X線管用が1セットにされた製品です (個別販売も可能)。
- ・ ボディ用は両面テープタイプ・特殊タタミになりますので清潔野を確保した取り外しが容易に行えます。

初期設置方法

イメージカバー (管球用)

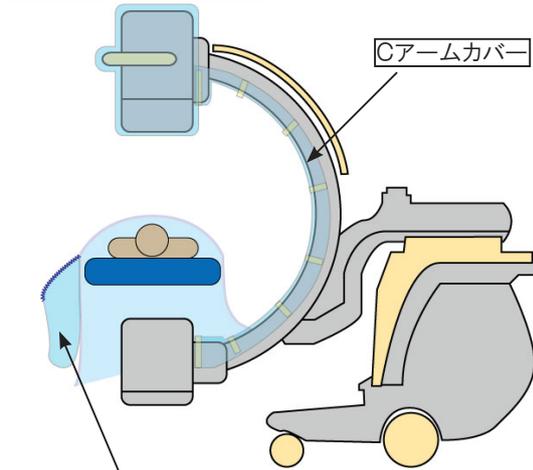


イメージカバー (X線管用)

■装着方法

- ①メッキバック開封後、Cアームカバー (PP-CARM-B) をセットします。
- ②イメージカバー管球用 (MB-IC-125) をセットします。
- ③各種ドレーピングを行います。
- ④X線管用カバー (MB-IC-9010E) をドレープに貼付けセットします。
- ⑤アーム動作時はX線管用カバーを支持し、清潔を保持します。
(未使用時はマジックテープを貼り合わせ開口部を閉じて使用下さい)


アーム動作時

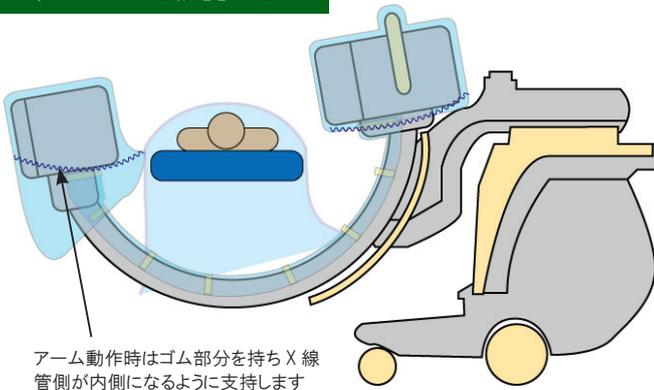


アーム動作時はゴム部分を持ちX線管側が内側になるように支持します

■構成品詳細


①PP-CARM-B

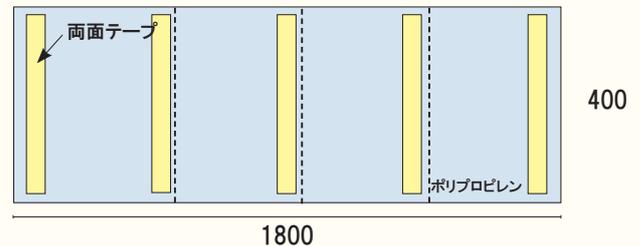

②MB-IC-125

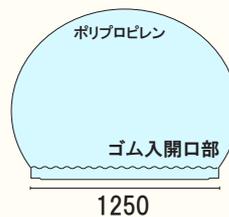

③MB-IC-9010E

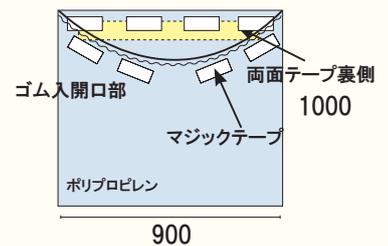

上記製品は、カスタマイズが可能な製品になります。構成品の変更・別注品の依頼は弊社営業担当もしくは販売代理店までご相談ください。

商品名	構成品番	数量	サイズ・規格	用途	入数	定価	滅菌
Cアーマーカバーセット PP-CARMER-B12	① PP-CARM-B	1枚	400 × 1800 mm	ボディ	20セット / 箱 × 2	オープン価格	○
	② MB-IC-125	1枚	125 φ	管球			
	③ MB-IC-9010E	1枚	900 × 1000mm	X線管			

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEILBART
ハイルバート

【本社営業部】
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4丁目45番地
TEL: 0584 (87) 1020
【東京支店】
〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 第二KSビル4F
TEL: 03 (3813) 2463