

APO708 N95マスク (折りたたみ式)

Particulate Respirator



米国 NIOSH 微粒子マスク クラス N95 認定 (42CFR84) 厚生労働省 SARS 対策指定品



■基本性能

	メーカー規格値	NIOSH 規格値
粒子捕集効率 (NaCl)	99.0%以上	95%以上
吸気抵抗値	105PA 以下	343PA 以下
排気抵抗値	110PA 以下	245PA 以下
梱包単位	30 枚 / 箱	-

- 空気感染予防 (新型インフルエンザ・SARS・結核菌など) 対策に対応するマスクです。
- 収納時・備蓄にスペースをとらない折りたたみ式。保管に便利な 15 枚毎包装。
- 空間調整用のノーズピースによりフィット性を高めます。

装着方法




①マスクを手に取り左右に広げます。



②マスクを固定し中かから紐を引き出します。



③マスクの下部をあごに固定し、紐を上にあげます。

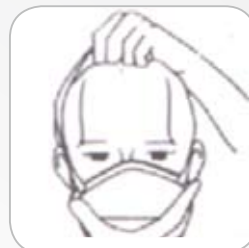

④頭に紐を引き、首部までそれをまわします。



⑤紐のうち1本を引き頭頂部にて固定します。



⑥鼻部のノーズピースを調節し装着完了です。

この製品は、疾患または感染のリスクを皆無にするものではありません。マスクが血液、体液で汚染された場合、直ちに交換して下さい。不適切な着用、誤った取り扱いをした場合健康に害を及ぼす恐れがございます。

商品名	商品番号	規格	入数	定価
N95 マスク (折りたたみ式)	AP0708	折りたたみ式	30 枚 / 箱 × 20	オープン価格

掲載商品に関するご質問は、販売代理店・営業部までお問い合わせください。他にも対策商品を取り揃えております。弊社ホームページも是非ご覧ください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEIL-BART
ハイルバート

◆営業本部
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029
◆東日本営業所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819