

サージカルマスク（紐結び・ブルー）

Surgical Mask BFE PFE VFE >99%

ASTM LEVEL1

- サージカルマスク（紐結び紐）は、医療機関向けの不織布3層構造の高機能使い捨てマスクです。
- 中間層のフィルターは、細菌ろ過率（BFE）99%以上・微粒子ろ過効率（PFE）99%以上・生体ウィルス遮断効率（VFE）99%以上の高い性能 **ASTM LEVEL1** を有しており、細菌、ウィルスなど空気中の微細物質の捕集能力に優れています。



長期保管にも最適な内袋入



保管場所の環境による

- ニオイの吸着防止
- ムシ等の異物混入防止
- 湿気対策

内袋包装がされています。

装着手順

- ①マスク本体を取り出します。
- ②ノーズピース部分を中央で曲げてください。
- ③マスク上側の紐を頭頂部で結びます。
- ④ノーズピースを鼻に押し当て隙間がないかを確認してください。
- ⑤マスクのブリーツを顎の下まで伸ばします。
- ⑥マスク下側の紐を首の後ろで結びます。
- ⑦もう一度隙間が無いかを確認したら、装着完了です。



外す手順

- ①首後ろ（下側）の紐をほどきます。
- ②頭頂部（上側）の紐をほどきます。
- ③マスク表面に触れないように紐を持って取り外してください。
- ④廃棄のルールに従い処分してください。

医療用サージカルマスク規格（米国標準規格 ASTM-F2100-11 LEVEL1 基準値）

| 特性 | 対象サイズ | LEVEL1 | VM-226B |
|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| BFE（細菌ろ過効率） | 3.0 μm | ≥ 95% | ≥ 99% |
| PFE（微粒子遮断効率） | 0.1 μm | ≥ 95% | ≥ 99% |
| VFE（生体ウィルス遮断効率） | 0.1 ~ 5.0 μm | - | ≥ 99% |
| 液体バリア性 | | 80mmhg | 80mmhg |
| 吸気抵抗（P） | | < 4.0mmH2O/cm ² | < 4.0mmH2O/cm ² |
| 延燃性 | | Class1 | Class1 |

試験証明書（カケンテストセンター）データ取得済み

| 商品名 | 商品番号 | カラー | 規格 | 入数 | 定価 | JAN |
|--------------------|---------|-----|--------------|--------------|--------|---------------|
| サージカルマスク （紐タイプ） | VM-226B | 青 | 175mm × 95mm | 50枚 / 箱 × 40 | オープン価格 | 4582115116419 |

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS

HEILBAR-T
ハイルバーティ

◆営業本部

〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4-45番地
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029

◆東日本営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル 802
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819